

## Aerozol na rany Prontosan®

**Przeznaczenie:** do czyszczenia, spłukiwania i nawilżania

- powierzchnowych ran (np. skaleczenia skóry, pogryzienia, rany cięte, otarcia, pęknięcia i zgniecenia)
- powierzchnowych poparzeń ogniem i substancjami chemicznymi

**Właściwości:** przyspiesza gojenie dzięki optymalnemu oczyszczeniu rany. Redukuje w ten sposób powstawanie blizn, nieprzyjemnego zapachu. Zapobiega zakażeniom rany, powstawaniu błony bakteryjnej. Chroni przed drobnoustrojami odpornymi na antybiotyki (MRSA, VRE, ESBL). Do zwilżania opatrunków na rany i podczas zmiany opatrunku do rozpuszczania opatrunków pokrytych strupem. Zmniejsza ból. Nie powoduje bólu podczas stosowania. Nie podrażnia. Produkt dobrze tolerowany. Nie hamuje ziarninowania i naskórkowania. Nie budzi zastrzeżeń pod względem dermatologicznym. Dobra tolerancja materiałów specjalnych i materiałów, z których są wykonane cewniki.

**Wskazówki dotyczące stosowania:** Czyszczenie i pielęgnacja ran i poparzeń: aerozol na rany Prontosan® w celu oczyszczenia i spłukania nanieść na całą powierzchnię rany i jej otoczenie. Zmniejsza to ryzyko zakażenia i stwarza optymalne warunki dla procesu gojenia. Następnie przykryć ranę plasterem lub opatrunkiem. Sklejone lub pokryte strupem opatrunki można zwilżyć aerozolem na rany Prontosan®, aby opatrunek odszedł od rany a ból nie był odczuwalny podczas zdejmowania opatrunku.

### Środki ostrożności:

- Tylko do stosowania zewnętrznego na rany. Nie stosować do infuzji ani wstrzykiwań. Nie przyjmować doustnie.
- W bardzo rzadkich przypadkach bezpośrednio po naniesieniu aerozolu na rany Prontosan® może wystąpić lekkie pieczenie na powierzchni rany, które jednak ustępuje po kilku minutach.
- Produkty Prontosan® mogą wywoływać reakcje alergiczne, takie jak pokrzywka ze swędzeniem i wysypka skórna. Bardzo rzadko (mniej niż u 1 pacjenta na 10 000) zgłaszano reakcje alergiczne, takie jak wstrząs anafilaktyczny.
- Aerozolu na rany Prontosan® nie wolno stosować w przypadku znanych alergii lub podejrzenia alergii na jakikolwiek jego składnik.
- Aerozolu na rany Prontosan® nie wolno stosować w ośrodkowym układzie nerwowym, do opon mózgowych, w uchu środkowym i wewnętrznym, w chrząstce szklistej lub w oku.
- Unikać inhalowania aerozolu na rany Prontosan®.
- Nie stosować w połączeniu z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, ponieważ mogą one wykazywać interakcje z poliheksanidyną.
- Ze względu na brak doświadczeń klinicznych u kobiet w ciąży, kobiet karmiących, aerozol na rany Prontosan® w tych przypadkach należy stosować tylko po starannym rozważeniu przez lekarza potencjalnego ryzyka względem oczekiwanych korzyści.
- Stosować tylko produkt, którego opakowanie nie budzi zastrzeżeń i jest nieuszkodzone. Butelki, które zetknęły się z raną, po użyciu należy wyrzucić.
- Jeżeli wystąpi obrzęk, zaczerwienienie lub ból rany, bądź gdy rana nie zaczyna się goić w ciągu kilku dni, należy zgłosić się do lekarza.
- Nie stosować bez przerwy dłużej niż 30 dni.

### Wskazówki dotyczące przechowywania:

- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Przydatność do użycia 36 miesięcy.
- Zużyć w ciągu 12 miesięcy od otwarcia.
- Chronić butelki przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- Wyrób medyczny – Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Skład / dane techniczne:** woda oczyszczona, powierzchniowo czynna betaina, 0,1% polyaminopropylu biguanidyny (poliheksanidyna)

**Wygląd i zapach:** klarowny, bezbarwny i prawie bezwonny roztwór wodny.

### Producent

B. Braun Medical AG  
Seesatz 17  
CH-6204 Sempach  
Wyrodkowano w Szwajcarii



Patrz instrukcja obsługi



Przechowywać miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci



Zużyć do: miesiąc i rok



Numer katalogowy



Numer katalogowy



Wytwórca



Niepowtarzalny identyfikator wyrobu



Autoryzowany przedstawiciel UE



Importer